

**¿Qué aspecto tiene la prueba?**

El Evalyn<sup>®</sup>Brush es de unos 18 cm de largo y consta de una envoltura exterior transparente con alas. Dentro de la envoltura exterior se encuentra una varilla rosa con un émbolo rosa en un extremo y un cepillo blanco en el otro. En el extremo del cepillo se encuentra un tapón rosa que encaja en la envoltura exterior con un clic. Cuando quite el tapón, puede sacar el cepillo blanco de la envoltura exterior empujando el émbolo rosa en la dirección de la carcasa transparente.



**¿Por qué utilizar el Evalyn<sup>®</sup>Brush?**

El Evalyn<sup>®</sup>Brush es un dispositivo especialmente desarrollado para la obtención de muestras de células vaginales. El Evalyn<sup>®</sup>Brush está provisto de un cepillo de cerdas finas, que garantiza la obtención de una muestra celular suficiente.

**Rovers Medical Devices**

Rovers Medical Devices está especializada en el desarrollo de dispositivos para la obtención de muestras de células para la investigación médica. La seguridad y la fiabilidad de los productos están garantizadas por los años de experiencia de Rovers Medical Devices en el desarrollo, la investigación y la producción de una amplia variedad de productos de investigación médica. El Cervex Brush<sup>®</sup> de Rovers<sup>®</sup> – conocido mundialmente por su innovador hisopo – forma parte de la gama de productos de Rovers Medical Devices.

Instrucciones para la prueba en casa



Versión Evaafd-2016-08-ES



**Rovers Medical Devices B.V.**

Lekstraat 10, 5347 KV Oss  
Países Bajos  
T +31 (0)412 648 870  
F +31 (0)412 623 835  
info@roversmedicaldevices.com  
www.roversmedicaldevices.com

El Evalyn<sup>®</sup>Brush de Rovers<sup>®</sup> es un producto patentado y un diseño registrado.

Rovers<sup>®</sup> y Evalyn<sup>®</sup> son marcas registradas de Rovers Medical Devices B.V. Oss, Países Bajos.



**Rovers<sup>®</sup> Medical Devices**

## El Evalyn<sup>®</sup>Brush

El Evalyn<sup>®</sup>Brush es un dispositivo estéril que le permite hacerse la prueba en casa. Utilizando el Evalyn<sup>®</sup>Brush puede obtener muestras de células vaginales de manera sencilla y sin dolor. Estas muestras celulares se analizan posteriormente en un laboratorio profesional.

## Notas importantes


- No debe utilizarse en caso de que el embalaje del Evalyn<sup>®</sup>Brush se encuentre dañado o si ha pasado la fecha de caducidad.
- No lo utilice durante la menstruación.
- No lo utilice durante el embarazo o en los tres meses posteriores al mismo.
- No utilice ningún producto vaginal durante un mínimo de dos días antes de utilizar el Evalyn<sup>®</sup>Brush. Los anticonceptivos vaginales, condones y lubricantes con base acuosa se pueden utilizar con normalidad.
- De un solo uso.
- Una reutilización puede acarrear una infección y un diagnóstico incorrecto.

## Sencillo, seguro y fiable


Estas son las instrucciones de uso del Evalyn<sup>®</sup>Brush.




1. Lávese las manos antes de utilizarlo.

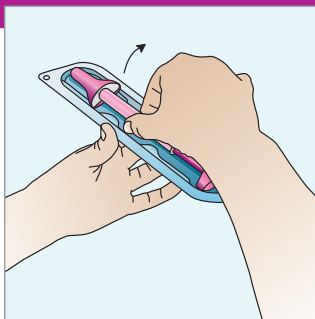


2. Saque el Evalyn<sup>®</sup>Brush del envase. No tire el embalaje, ya que es necesario para enviar el Evalyn<sup>®</sup>Brush al laboratorio después de su uso.

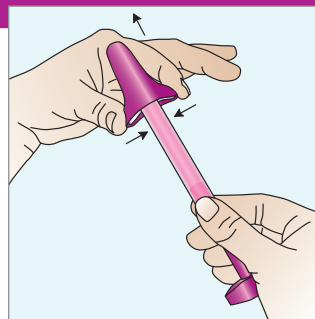


3. Presione los laterales del tapón rosa con el pulgar y el índice para retirarlo del Evalyn<sup>®</sup>Brush. ¡Asegúrese de no tocar las fibras blancas del Cepillo Evalyn<sup>®</sup> con las manos!

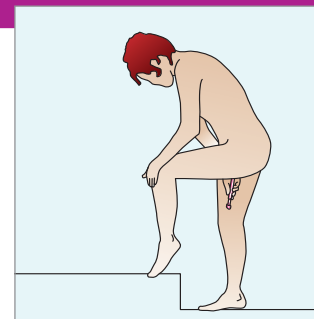


4. Póngase de pie para tomar la muestra. Adopte una postura cómoda (por ejemplo, como si fuera a colocarse un tampón).

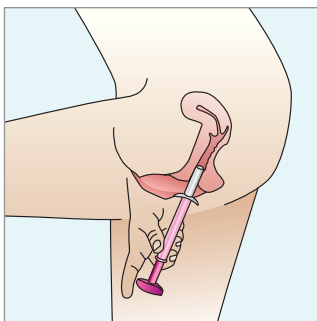


5. Abra sus labios con una mano, y con la otra, inserte el Evalyn<sup>®</sup>Brush en la vagina hasta que las alas toquen los labios.

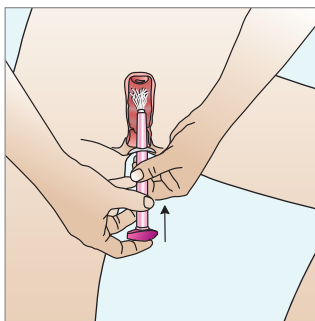


6. Sostenga la envoltura exterior transparente con una mano, y con la otra mano, empuje el émbolo de color rosa en la dirección de la envoltura transparente. Escuchará y notará un clic cuando el cepillo se encuentre en la posición correcta con el émbolo rosa en contacto directo con la envoltura exterior.

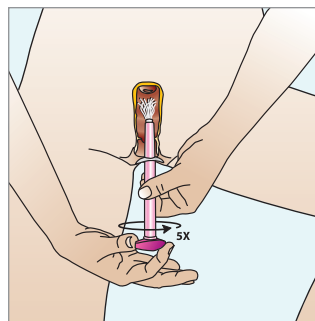


7. Gire el émbolo rosa cinco veces en la misma dirección. Después de cada rotación, escuchará un clic. Esto le ayudará a contar las rotaciones. Después de girar el émbolo cinco veces, retire el Evalyn<sup>®</sup>Brush con cuidado.

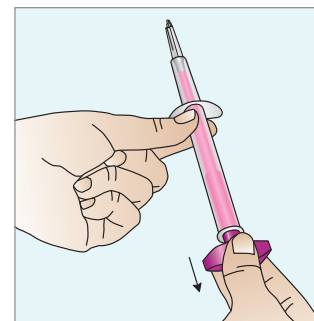


8. Sostenga la envoltura exterior transparente con una mano, y con la otra mano, empuje el émbolo de color rosa hasta que el cepillo blanco desaparezca en la envoltura transparente. Al hacer esto, no toque la parte superior por encima de las alas.

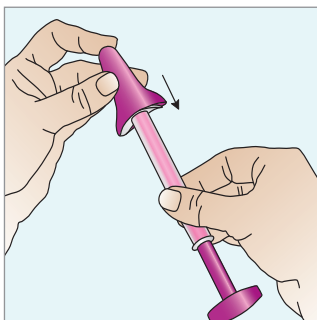


9. Sujételo por el extremo transparente para garantizar que el cepillo blanco no vuelve a salir. Vuelva a colocar el tapón rosa en el Evalyn<sup>®</sup>Brush utilizando el pulgar y el índice. Escuchará un clic cuando encaje correctamente en su sitio.

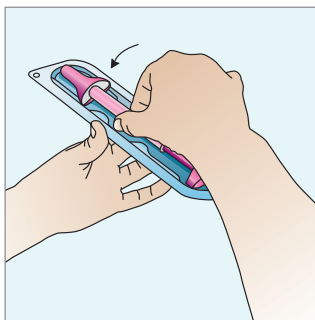

10. Vuelva a colocar el Evalyn<sup>®</sup>Brush en el embalaje.

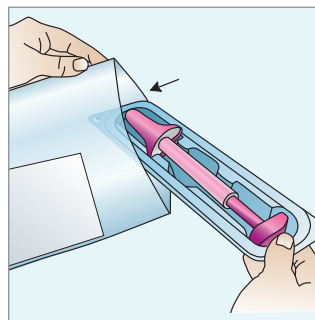

11. Vuelva a colocar el Cepillo Evalyn<sup>®</sup> en la bolsa de plástico suministrada y séllela.

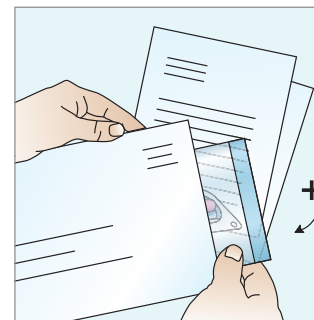

12. Use el sobre de devolución para enviar la bolsa de plástico con el Evalyn<sup>®</sup>Brush, junto con otra información requerida.