

Hvordan ser selvtesten ut?

Evalyn[®]Brush er omtrent 18cm lang og består av en gjennomsiktig beholder med vinger. Beholderen inneholder en rosa pinne med en rosa sprøyte på den ene enden og en hvit børste på den andre enden. På enden av børsten er det mulig å klikke en rosa hette på beholderen. Når du tar av hetten, kan du skyve den hvite børsten ut av beholderen ved å trykke den rosa sprøyten mot den gjennomsiktige beholderen.



Hvorfor bruke Evalyn[®]Brush?

Evalyn[®]Brush er en enhet som er spesielt utviklet for henting av cellematerial fra skjeden. Evalyn[®]Brush er utstyrt med en børste med fine børstehår, som sikrer at du henter nok cellematerial.

Rovers Medical Devices

Rovers Medical Devices har spesialisert seg på utviklingen av utstyr for henting av celleprøver for medisinsk forskning. Sikkerheten og påliteligheten til våre produkter garanteres gjennom den langårige erfaringen som Rovers Medical Devices har innenfor utvikling, forskning og et bredt utvalg av medisinske forskningsprodukter. Rovers[®] Cervex Brush[®] – globalt kjent for den innovative penselen – er del av produktsortimentet til Rovers Medical Devices.

Instruksjoner for hjemmetesten



Evaafd 2018-04 NO



Produsent: **Rovers Medical Devices B.V.**
Lekstraat 10, 5347 KV Oss,
the Nederlands
Tlf.: +31 412 648870
Faks: +31 412 623835
E-post: info@roversmedicaldevices.com
Nettside: www.roversmedicaldevices.com

Rovers[®] Evalyn[®]Brush er et patentert produkt og registrert design.

Rovers[®] og Evalyn[®] er registrerte varemerker til Rovers Medical Devices B.V. Oss, Nederland.
© Rovers Medical Devices B.V.

CE 0044

STERILE EO



Rovers[®] Medical Devices

Evalyn®Brush

Evalyn®Brush er en steril enhet som gir deg mulighet til å utføre tester hjemme. Ved å bruke Evalyn®Brush, kan du hente cellematerial fra skjeden på en enkel og smertefri måte. Dette cellematerialet blir deretter analysert i et profesjonelt laboratorium.

Viktig informasjon


- Må ikke brukes dersom forpakningen til Evalyn®Brush er skadet eller den har gått ut på dato.
- Skal ikke brukes under menstruasjon.
- Skal ikke brukes under graviditet eller tre måneder etter graviditet.
- Ikke bruk andre vaginale produkter minst to dager før du bruker Evalyn®Brush. Vaginale prevensjonsmidler, kondomer og vannbasert glidemiddel kan brukes som vanlig.
- Kun til engangsbruk.
- Gjenbruk kan føre til infeksjon og/eller feil diagnose.

Enkel, sikker og pålitelig


Disse instruksjonene gjelder for bruk av Evalyn®Brush.




1. Vask hendene før bruk

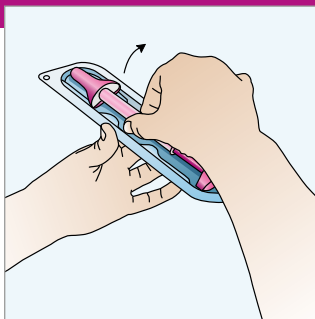


2. Ta Evalyn®Brush ut av forpakningen. Ikke kast forpakningen, den er nødvendig for å sende Evalyn®Brush til laboratoriet etter bruk.

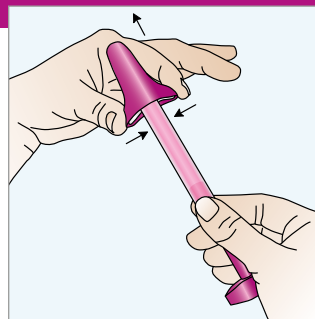


3. Bruk tommelen og pekefingeren til å trykke på sidene til den rosa hetten for å ta av den rosa hetten fra Evalyn®Brush. Pass på at du ikke berører de hvite fibrene til Evalyn®Brush med hendene!

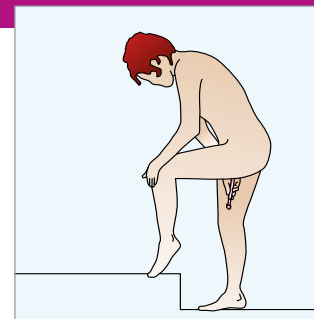


4. Ta prøven i stående posisjon. Innta en komfortabel stilling (for eksempel som når du setter inn en tampong).

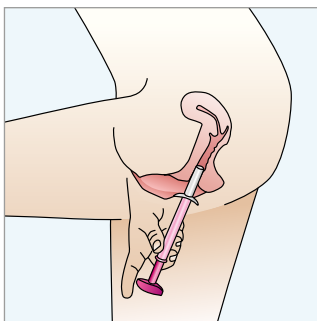


5. Spre kjønnsleppene med en hånd, og bruk den andre hånden til å føre Evalyn®Brush inn i skjeden til vingene berører kjønnsleppene.

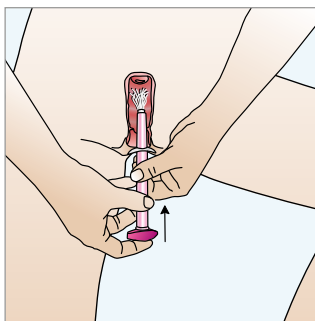


6. Hold den gjennomsiktige beholderen med en hånd, og bruk den andre hånden til å skyve den rosa sprøyten i retning av den gjennomsiktige beholderen. Du vil høre og føle et klikk når børsten er i riktig posisjon med den rosa sprøyten mot beholderen.

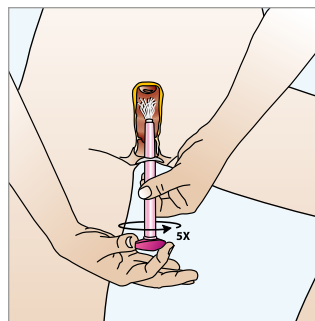


7. Vri den rosa sprøyten fem ganger rundt i samme retning. Etter hver rotasjon, hører du et klikk. Dette hjelper deg med å telle antall rotasjoner. Etter at sprøyten er blitt vridd fem ganger, fjernes Evalyn®Brush forsiktig.

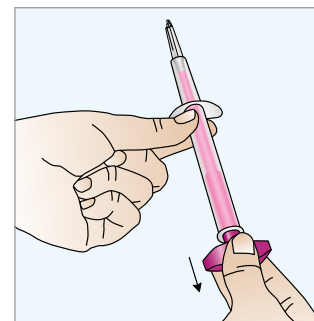


8. Hold den gjennomsiktige beholderen med en hånd, og bruk den andre hånden til å dra i den rosa sprøyten til den hvite børsten forsvinner i beholderen. Når du gjør dette må du ikke berøre den øvre delen til Evalyn®Brush over vingene.

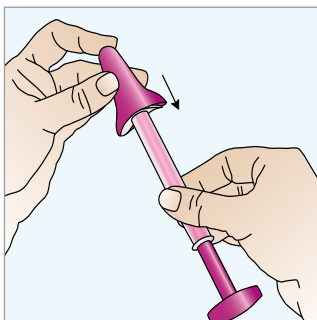


9. Hold fast den gjennomsiktige enden slik at den hvite børsten ikke skyves ut igjen. Bruk tommelen og pekefingeren til å sette den rosa hetten tilbake på Evalyn®Brush. Du hører et klikk når den er på plass.

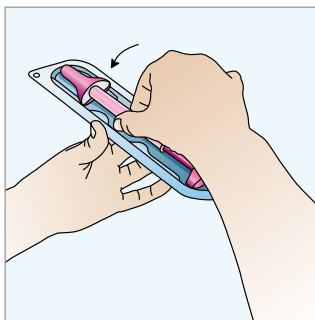

10. Legg Evalyn®Brush tilbake i forpakningen.

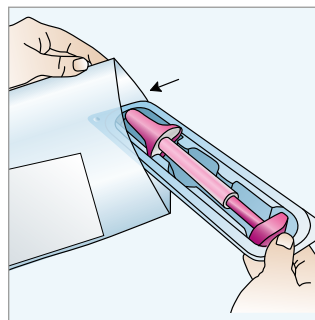

11. Legg forpakningen som inneholder Evalyn®Brush i den vedlagte plastposen og forsegle den.

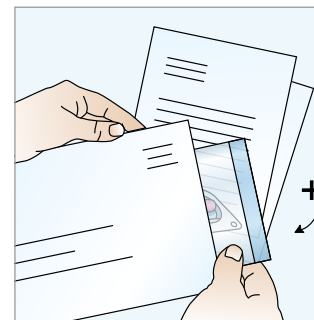

12. Bruk returkonvolutten til å sende plastposen som inneholder Evalyn®Brush sammen med annen nødvendig informasjon.