


Jak wygląda autotest?

Szczoteczka Evalyn[®]Brush ma długość około 18 cm i składa się z przezroczystej obudowy ze skrzydełkami. Wewnątrz obudowy znajduje się różowy pręcik z różowym uchwytem na jednym końcu i białą szczoteczką na drugim. Na koniec ze szczoteczką można nałożyć na obudowę różową nasadkę. Po zdjęciu nasadki można wypchnąć białą szczoteczkę z obudowy, dociskając różowy uchwyt w kierunku przezroczystej obudowy.

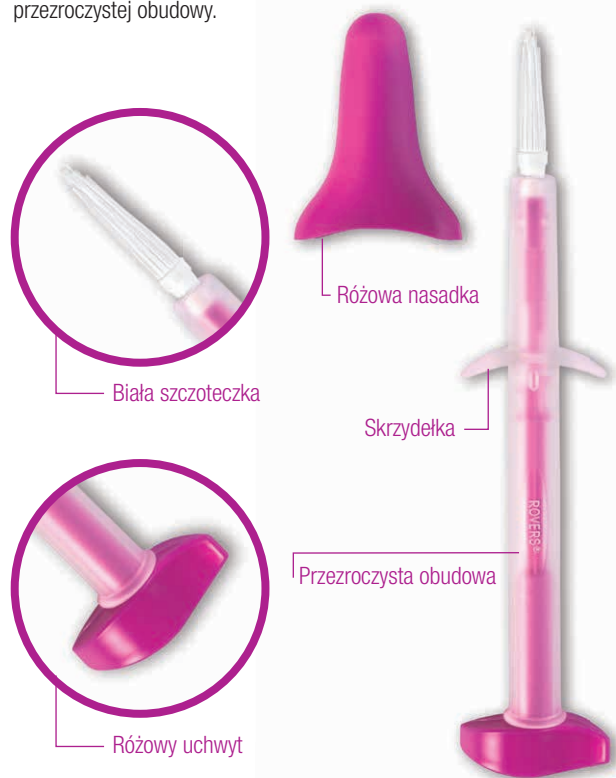

Dlaczego używać szczoteczki Evalyn[®]Brush?

Szczoteczka Evalyn[®]Brush została stworzona specjalnie z myślą o pobieraniu materiału komórkowego z pochwy. Szczoteczka Evalyn[®]Brush posiada delikatne włoski, co umożliwia zebranie każdorazowo odpowiedniej ilości materiału komórkowego.

Rovers Medical Devices

Firma Rovers Medical Devices specjalizuje się w produkcji urządzeń do pobierania próbek komórkowych do badań medycznych. Bezpieczeństwo i niezawodność naszych produktów są oparte na wieloletnim doświadczeniu firmy Rovers Medical Devices w zakresie opracowywania, wdrażania i produkcji szerokiej gamy produktów do badań medycznych. Szczoteczka Rovers[®] Cervex Brush[®] – znana na całym świecie dzięki swej innowacyjnej wymazówce – stanowi część oferty firmy Rovers Medical Devices.

Instrukcja przeprowadzania testu domowego



Wersja Evaofd-2016-08-PL



Rovers Medical Devices B.V.

Lekstraat 10, 5347 KV Oss
Holandia
T +31 (0)412 648 870
F +31 (0)412 623 835
info@roversmedicaldevices.com
www.roversmedicaldevices.com

Szczoteczka Rovers[®] Evalyn[®]
to produkt chroniony patentem
o zarejestrowanym wzorze.

Rovers[®] i Evalyn[®] to
zarejestrowane znaki handlowe
Rovers Medical Devices B.V. Oss,
Holandia.

CE 0044

STERILE EO

Szczoteczka Evalyn®Brush

Szczoteczka Evalyn®Brush to urządzenie sterylne, umożliwiające przeprowadzenie testu w warunkach domowych. Za pomocą szczoteczki Evalyn®Brush można łatwo i bezboleśnie pobierać materiał komórkowy z pochwy. Ten materiał może zostać później poddany analizie w profesjonalnym laboratorium.

Ważne uwagi


- Nie używać, jeśli opakowanie szczoteczki Evalyn®Brush jest uszkodzone ani po upływie terminu przydatności.
- Nie używać podczas menstruacji.
- Nie używać w ciąży ani przez trzy miesiące po zakończeniu ciąży.
- Nie używać żadnych produktów dopochwowych przez co najmniej dwa dni przed użyciem szczoteczki Evalyn®Brush. Można normalnie używać dopochwowych środków antykoncepcyjnych, prezerwatyw oraz środków nawilżających na bazie wody.
- Wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Ponowne użycie może skutkować zakażeniem lub nieprawidłową diagnozą.

Prosta, bezpieczna i niezawodna


Poniższe instrukcje dotyczą używania szczoteczki Evalyn®Brush.




1. Przed użyciem umyj ręce.

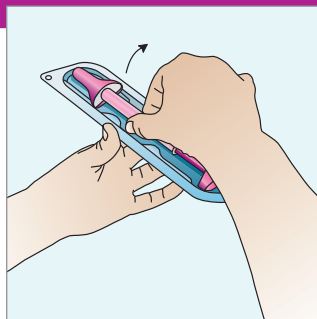


2. Wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush z opakowania. Nie wyrzucaj opakowania, gdyż będzie ono potrzebne do wysłania szczoteczki Evalyn®Brush do laboratorium po użyciu.

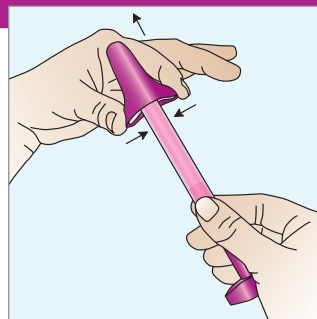


3. Ściśnij boki różowej nasadki za pomocą kciuka i palca wskazującego w celu jej zdjęcia ze szczoteczki Evalyn®Brush. Pamiętaj, aby nie dotykać rękami białych włosków szczoteczki Evalyn®Brush!

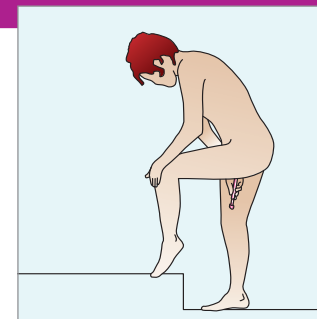


4. Pobieraj próbkę w pozycji stojącej. Zapewnij sobie wygodne podparcie (takie jak np. do wkładania tamponu).

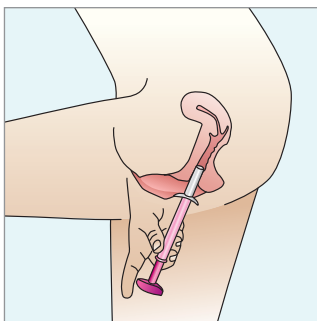


5. Rozchyl jedną ręką wargi sromowe, a drugą wprowadź szczoteczkę Evalyn®Brush do pochwy, aż skrzydełka zetkną się z wargami sromowymi.

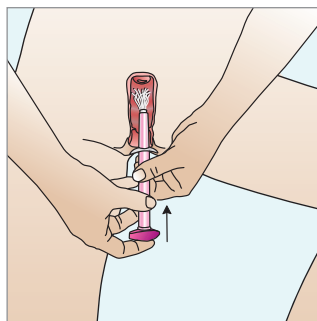


6. Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą dociśnij różowy uchwyt w kierunku przezroczystej obudowy. Gdy szczoteczka znajdzie się we właściwym położeniu z różowym uchwytem przy obudowie, usłyszysz i poczujesz kliknięcie.

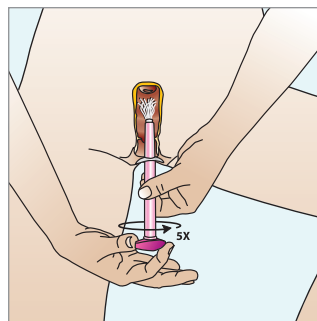


7. Obróć różowy uchwyt o pięć obrotów w tym samym kierunku. Po każdym obrocie usłyszysz kliknięcie. Kliknięcia będą pomocne w liczeniu obrotów. Po pięciokrotnym obrocie uchwytu ostrożnie wyjmij szczoteczkę Evalyn®Brush.

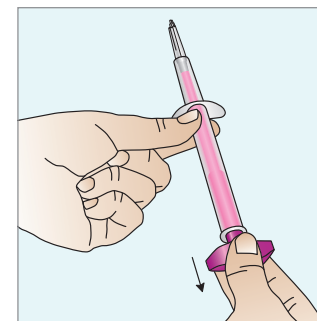


8. Przytrzymaj przezroczystą obudowę jedną ręką, a drugą pociągnij różowy uchwyt, aż biała szczoteczka schowa się w obudowie. Podczas wykonywania tej czynności nie dotykaj szczoteczki Evalyn®Brush powyżej skrzydełek.

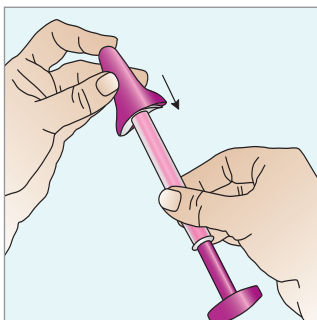


9. Przytrzymaj przezroczysty koniec tak, aby biała szczoteczka nie wysunęła się ponownie. Umieść różową nasadkę z powrotem na szczoteczce Evalyn®Brush za pomocą kciuka i palca wskazującego. Po prawidłowym założeniu usłyszysz kliknięcie.

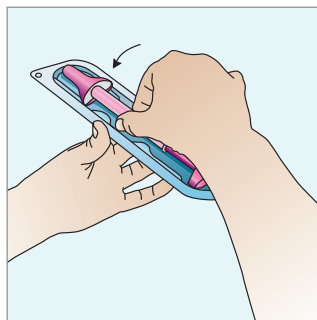

10. Umieść szczoteczkę Evalyn®Brush z powrotem w opakowaniu.

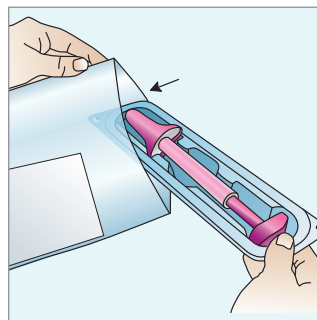

11. Umieść opakowanie zawierające szczoteczkę Evalyn®Brush w dostarczonej plastikowej torebce i zamknij torebkę.

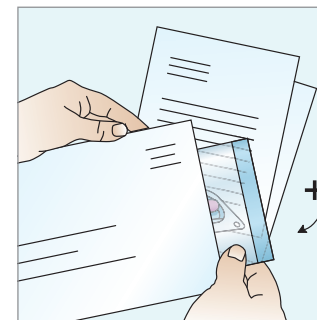

12. Użyj koperty zwrotnej w celu wysłania plastikowej torebki zawierającej szczoteczkę Evalyn®Brush i wszystkich wymaganych informacji.